

DESCRIZIONE

Il deviatore di ossigeno RapidO2 permette, tramite una semplice manovra, di selezionare alternativamente se fornire l'ossigeno, proveniente dal flussimetro a muro, al flacone di umidificazione (modo H₂O), piuttosto che direttamente al paziente (modo O₂), permettendo quindi di scegliere tra differenti terapie in ossigeno.

INFORMAZIONI GENERALI

- Connessioni (Raccordo superiore) ¼ GAS Femmina (deviatore di colore azzurro) o 9/16" UNF Femmina (deviatore di colore bianco o verde)
- Connessione 9/16" UNF Maschio (Raccordo inferiore)
- Privo di Lattice.
- Privo di PVC.
- Il prodotto è fornito in confezione non sterile. **Sterilizzare prima dell'uso.**

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni note.

PRECAUZIONI

Qualora si verificassero ostruzioni o perdite di flusso sostituire immediatamente il dispositivo. Il dispositivo deve essere utilizzato sulla base delle indicazioni terapeutiche del medico e sotto la sua supervisione.

AVVERTENZE

Per un utilizzo corretto, RapidO2 deve sempre essere connesso a valle del flussimetro. RapidO2 può essere utilizzato in condizioni di sicurezza solo nel campo di applicazione e con le modalità indicate nel presente foglio d'istruzioni d'uso. Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da uso improprio e comunque diverso da quello indicato. Non utilizzare nel caso in cui la busta risultasse aperta o danneggiata. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in ospedale, da personale sanitario qualificato.

MODO H₂O – USO IN UMIDIFICAZIONE DI OSSIGENOTERAPIA

Avvitare fino a tenuta, senza forzare, RapidO2 al flussimetro tramite il raccordo superiore. Avvitare il flacone tramite l'apposito raccordo per umidificazione a RapidO2 tramite il raccordo inferiore. Posizionare il selezionatore di flusso su "Lato H₂O" come da Figura 1.

MODO O₂ – USO IN OSSIGENO NON UMIDIFICATO O AEROSOLTERAPIA

Avvitare fino a tenuta, senza forzare, RapidO2 al flussimetro tramite il raccordo superiore. Connettere il dispositivo scelto per la somministrazione al raccordo universale frontale. Posizionare il selezionatore di flusso su "Lato O₂" come da Figura 2.

PULIZIA E STERILIZZAZIONE

RapidO2 è un dispositivo pluriuso, da risterilizzare ad ogni cambio paziente, fino ad un massimo di 50 volte (pari ad un utilizzo medio di un anno) dopo le quali deve essere smaltito rispettando le disposizioni di legge vigenti. Per la pulizia utilizzare esclusivamente soluzione fisiologica o acqua e detersivi delicati in concentrazione pari a quella indicata sulla confezione degli stessi oppure soluzione di amuchina al 2 %. Risciacquare con soluzione fisiologica e asciugare su teli assorbenti monouso o con aria compressa. Non utilizzare detersivi a base alcolica. Sterilizzare i deviatori singolarmente confezionati in buste monouso compatibili con il sistema di sterilizzazione a disposizione a gas plasma di perossido d'idrogeno o a vapore saturo a 121 °C per 15 minuti (ciclo gomma). Conservare i dispositivi sterilizzati in luogo pulito al fine di evitare eventuali contaminazioni.



Figura 1

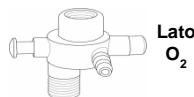


Figura 2



EMIMED s.r.l.
Via L. Pasteur, 16/A - 42122 Reggio Emilia - Italy
Tel.: +39-0522-515306 - Fax: +39-0522-0131162
www.emimed.it - info@emimed.it

