

DentaSafe™ Intubating Foam Guard

DentaSafe™ é una striscia di foam adesiva da applicare direttamente alla lama del laringoscopio al fine di evitarne il contatto diretto con i denti del paziente.



1. Prelevare Denta Safe™ dalla pratica confezione ed applicarlo sul laringoscopio.
2. Procedere con l'intubazione.
3. Rimuovere Denta Safe™ per mezzo della linguetta non adesiva.



Denta Safe™ evita il contatto diretto tra la lama del laringoscopio ed i denti del paziente, riducendo il rischio di scheggiature. Non riduce lo spazio visivo all'interno del cavo orale ed è pertanto indicato anche in pazienti con bocca particolarmente piccola. L'adesivo garantisce il corretto posizionamento e non lascia residui sulla lama.

Codice	Descrizione	Confezione
EMI 300-101	Dentasafe, rotolo da 50 pezzi	250 pz.

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

EMIMED S.r.l.

Website: www.emimed.it – Email: info@emimed.it

Via L. Pasteur, 16/A – 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522/515306 – Fax 0522/0131162

Distribuito da: