

Perché rischiare???

Proteggi i denti dei tuoi pazienti




La rottura o scheggiatura dei denti è una delle complicanze più frequenti durante le manovre di intubazione, ed una delle principali motivazioni di richieste risarcimento danni.

In caso di intubazione difficile è dimostrato che il rischio diventa ancora più elevato.




Tooth Protector™ è un paradenti anatomico estremamente semplice da posizionare che garantisce una eccellente protezione dell'arcata superiore.

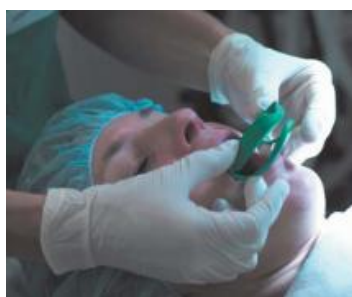

1. Immergere Tooth Protector in acqua pura per lubrificarne le superfici.
2. Inserire Tooth Protector nel cavo orale piegandolo su se stesso.
3. Procedere con l'intubazione.

Tooth Protector è in misura unica e si adatta ad ogni tipo di bocca. Se non è posizionato in modo corretto viene sputato. Denti ed otturazioni non vi si incastrano ed il mantenimento in posizione è garantito dall'arco contrapposto.

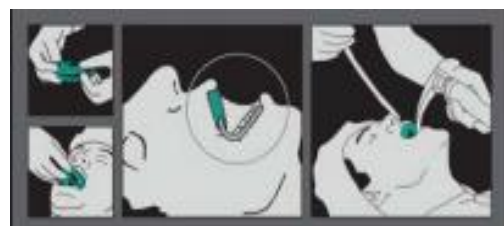

Codice	Descrizione	Confezione
EMI 300-102	Tooth Protector, confezionato in busta singola	100 pz.

Distributore autorizzato:

EMIMED S.r.l.

Via Pasteur 16/A – 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522/515306 – Fax 0522/0131162

Website: www.emimed.it

Email: info@emimed.it

Distribuito da: