

## Istruzioni Cannulaide™

1.

Selezionare la Cannulaide™ della misura corretta per il paziente usando la tabella dei pesi a destra.

Peso del neonato	Cannulaide™
<700g	Misura 0
<1250g	Misura 1
<2000g	Misura 2
<3000g	Misura 3
>3000g	Misura 4


2.

Pulire il naso del neonato con acqua e asciugarlo completamente. La preparazione corretta della pelle del neonato è fondamentale per ottenere le prestazioni ottimali della Cannulaide™.



3.

Scaldare la Cannulaide™ fra le mani per 30-45 secondi, quindi rimuoverla dal relativo supporto.

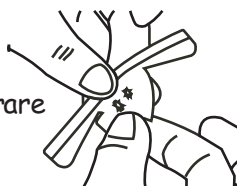

4.

Stendere delicatamente la Cannulaide™ per liberare le incisioni intorno ai fori.



5.

Inserire i denti attraverso i fori nella Cannulaide™.



6.

Collocare la Cannulaide™ e l'assieme dei denti nelle narici del neonato.

7.

Stendere uniformemente la Cannulaide™ in posizione sul naso e sul viso del neonato. Orientare il velcro della Cannulaide in modo che punti verso i punti di fissaggio della cinghia sulla cuffietta del neonato. Non tendere la Cannulaide™ per sistemarla. Dopo un breve periodo di tempo l'idrocolloide cercherà di assumere la sua forma originale e si staccherà dalla pelle.



## Istruzioni Cannulaide™


- 8.** Installare la parte per la testa CPAP sull'assieme dei denti.



- 9.** Stendere uniformemente le cinghie sul velcro della Cannulaide e assicurarle dalla parte per la testa alla cuffietta. La parte per la testa deve essere allentata e non tirata verso il basso contro il naso del paziente. Ricordare che la tenuta CPAP è creata dalla Cannulaide™ e non dal posizionamento dei denti contro il neonato.



- 10.** Assicurare la cinghia di stabilizzazione della cuffietta sul tubo CPAP. Accertarsi che la parte per la testa sia in posizione neutra.

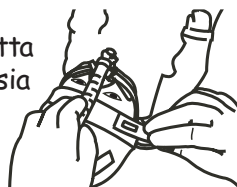

Cannulaide™ in posizione con tubo CPAP in stile "sopra la testa".

Il contenuto di questa confezione è pulito e pronto all'uso. Non è sterile.

Le leggi federali (USA) limitano la vendita di questo dispositivo alla prescrizione medica.

Solo per uso pediatrico o infantile.

-  Solo per uso mono-paziente
  Non sterile
  Non risterilizzare
-  Non esporre a temperature superiori a 150° F (60° C)
  Contiene 25 sigilli nasali CPAP per neonati Cannulaide™

### Prodotto da

Beevers Mfg & Supply  
14670 Baker Creek Rd  
McMinnville, OR 97128  
Stati Uniti d'America  
Tel: +1 (503) 472-9055  
URL: <http://www.beevers.net>

### EC REP Rappresentante autorizzato

Emergo Europe  
Molenstraat 15  
2513 BH, L'Aja  
Paesi Bassi  
Tel: +31 (0)70 345 8570  
Fax: +31 (0)70 346 7299

Paese di origine: USA

