

# Mechanical Advantage Tourniquet



**Efficace** : **MAT Tourniquet** permette il massimo controllo del sanguinamento arterioso e aumenta significativamente la sopravvivenza del paziente grazie a una compressione sicura e modulabile

**Veloce** : l'applicazione di **MAT Tourniquet** e l'occlusione del flusso sanguigno vengono ottenute con manovre rapide e sicure in meno di dieci secondi

**Facile** : **MAT Tourniquet** può essere applicato con semplici manovre utilizzando anche una sola mano

## Istruzioni d'uso



1 Poni MAT sull'arto, al di sopra della ferita

2 Assicura la fibbia al gancio

3 Tira la cinghia senza forzare

4 Ruota la chiave per stringere e occludere in sicurezza il flusso sanguigno


5 Premi il pulsante di rilascio o solleva la fibbia per allentare il MAT

**Rapido Rilascio** : **MAT Tourniquet** è stato appositamente progettato per avere un rapido rilascio e una veloce riapplicazione

**Arti intrappolati** : **MAT Tourniquet** è l'unico in grado di ottenere una efficace occlusione arteriosa in sicurezza su arti intrappolati. Completamente regolabile, è utilizzabile su ogni arto

**Testato** : test militari (\*) hanno evidenziato come **MAT Tourniquet** sia il più veloce, efficace e sicuro tourniquet per emergenza sul mercato e il preferito dagli operatori

**La rapida e completa occlusione arteriosa fornita da MAT Tourniquet è di fondamentale importanza nella gestione delle emergenze extra-ospedaliere**

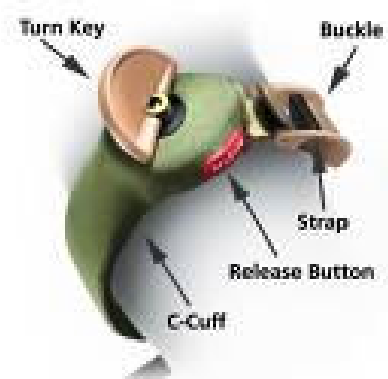

## Caratteristiche del prodotto

- Efficace su arti superiori e inferiori
- Taglia unica
- Leggero e compatto
- Radiotrasparente
- Latex free
- Marcato CE
- Monouso



(\*) **Bibliografia**: Army Medical Training Center Test 04/08/2005 - NEDU ONR/MARCORSYSCOM Test 06/08/2005 – NEDU ONR/MARCORSYSCOM Test 08/11/2006 – Navy Trauma Training Center Test 07/09/2005

Codice	Descrizione	Confezione
EMI 200-005	MAT Tourniquet	1 pz.

**DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:**  
**EMIMED TECH S.r.l.**  
 Via Gramsci 104/F - 42100 Reggio Emilia  
 Tel. 0522/515306 - Fax 0522/0131162  
 Website: www.emimed.it - Email: info@em

**EmiMed**  
 Tech

Distribuito da: