

SCHEDA TECNICA

MAT - TOURNIQUET

Produttore:	PYNG MEDICAL 7-13511 Crestwood Place Richmond BC V6V 2E9 CANADA
Mandatario europeo:	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH – The Hague - Olanda
Importatore autorizzato per l'Italia:	Emimed Tech S.r.l. Via Gramsci 104/F - 42124 Reggio Emilia
Classe di appartenenza in conformità alla Direttiva Europea 93/42/EEC	Classe I
Metodo di sterilizzazione:	NON STERILE
Presenza lattice:	NO
Classificazione CND: meccanici	C90010301 – Sistemi per emostasi
Numero di Repertorio:	301218

Descrizione:

MAT TOURNIQUET è un laccio emostatico meccanico monopaziente che permette il massimo controllo del sanguinamento arterioso, sia degli arti superiori che di quelli inferiori, ed aumenta significativamente la sopravvivenza del paziente grazie ad una compressione efficace e modulabile. L'applicazione di MAT TOURNIQUET e l'occlusione del flusso sanguigno vengono ottenute con manovre rapide e sicure in meno di dieci secondi.

MAT TOURNIQUET può essere applicato utilizzando anche una sola mano. Grazie al sistema di aggancio ed al bottone RELEASE è possibile ottenere un immediato rilascio della compressione ed una veloce ri-applicazione.

Caratteristiche

MAT TOURNIQUET è un dispositivo monopaziente non sterile confezionato singolarmente.

Le parti plastiche del MAT TOURNIQUET sono composte in Delrin, (polioossimetilene – POM) ad eccezione del gancio che è prodotto in Poliammide (PA); i perni sono in acciaio inossidabile, le corde di trazione e la cinghia sono in polipropilene (PP), la guaina di protezione esterna è in Neoprene ed il bottone RELEASE è costituito da silicone. MAT TOURNIQUET è pertanto un dispositivo Latex free e radiotrasparente.

Istruzioni per l'uso:

1. POSIZIONAMENTO

Posizionare MAT TOURNIQUET sull'arto (superiore o inferiore) più in alto rispetto alla ferita.

2. AGGANCIO

Inserire la fibbia della cinghia nell'apposito gancio "a C".

3. REGOLAZIONE DELLA CINGHIA

Tirare la cinghia fino a stringere il dispositivo attorno all'arto.

4. COMPRESSIONE

Girare la chiave fino all'avvenuta occlusione del flusso sanguigno.

RILASCIO

Premere il pulsante di rilascio (RELEASE) e sollevare la fibbia dal gancio.

RIPRISTINO

Premere il pulsante di rilascio (RELEASE) e tirare con decisione tutta la fibbia fuori dal dispositivo.

Avvertenze:

Assicurarsi che MAT TOURNIQUET sia completamente ripristinato prima di ogni applicazione.

Codice Distributore	Codice Produttore	Descrizione	Confezione
EMI 200-005	MAT	MAT TOURNIQUET – laccio emostatico meccanico	1 pz.