

SCHEDA TECNICA

READY-HEAT II - MINI

Produttore:	TECHTRADE LLC 183 Madison Avenue, Suite 1416 New York NY 10016 – U.S.A.
Mandatario Europeo:	SPECIAL MEDICS Glessenborch 54 4132 HR – Vianen – Olanda
Importatore autorizzato: per l'Italia	Emimed Tech S.r.l. Via Gramsci 104/F - 42124 Reggio Emilia
Classe di appartenenza in conformità alla Direttiva Europea 93/42/EEC	Classe I
Metodo di sterilizzazione:	NON STERILE
Presenza lattice:	NO
Classificazione CND:	T030399 - Coperture di riscaldamento – Altre

Descrizione:

READY-HEAT II e READY-HEAT MINI sono coperte monopaziente appositamente progettate per il trattamento dello shock e dell'ipotermia del paziente specialmente in tutti quei casi ove non è disponibile una presa di corrente per connettere sistemi di riscaldamento ad aria o dove il limitato ingombro e peso del dispositivo sono caratteristiche fondamentali per il suo utilizzo.

READY-HEAT MINI è dotata di due strisce a velcro per poter essere avvolta, ad esempio, attorno ad una flebo, permettendo così anche il riscaldamento dei liquidi da infondere oppure attorno ad un arto per un riscaldamento localizzato.

La particolarità delle coperte READY-HEAT è infatti quella di riscaldarsi al semplice contatto con l'ossigeno presente nell'aria, raggiungendo già la temperatura di 37,7° C (100° F) nell'arco di 8-10 minuti e mantenendo al minimo questa temperatura fino a 6 ore.

Caratteristiche

READY-HEAT II e READY-HEAT MINI sono formate da tre componenti principali:

1 – Coperta esterna in TNT

Il tessuto non tessuto, di colore azzurro, è composto al 98% da polycapronamide e al 2% da biossido di titanio ed ha una finitura idrorepellente

2 – Elementi riscaldanti

All'interno di READY-HEAT II, contenuti in tasche sigillate, sono presenti 12 pannelli di dimensioni 12,7 x 15,2 cm., (1 pannello nella coperta READY-HEAT MINI), contenenti il composto chimico riscaldante. Tale composto è formato da: polvere di ferro (50-60%), acqua (15-25%), carbone

attivo (5-10%), vermiculite allo stato liquido (1-3%), sale (2-5%), polvere di legno (2-5%) e polvere idro-assorbente (0,1-1%).

3 – Sacca esterna trasparente

La coperta è contenuta all'interno di un imballo sottovuoto in polipropilene

Istruzioni per l'uso:

1. Non aprire l'imballo esterno sottovuoto fino a che non si è pronti per l'utilizzo sul paziente.
2. Rimuovere la coperta dall'imballo protettivo esterno ed esporla all'aria. Non strappare la coperta o aprire le tasche interne.
3. Considerare che la coperta necessita di circa 15-30 minuti per raggiungere la temperatura d'esercizio.
4. Se la temperatura decresce, esporre la coperta all'aria nuovamente.
5. Dopo l'uso smaltire la coperta come un normale rifiuto. Tutti i componenti sono naturali e non costituiscono un pericolo per l'ambiente.

Avvertenze:

Non seguire le seguenti precauzioni potrebbe causare gravi ustioni o altre gravi lesioni

1. Un'attenta supervisione è necessaria durante l'utilizzo su pazienti anziani, bambini, pazienti con pelli sensibili o con coloro che non hanno sensibilità termica o che non riescono a regolare la temperatura corporea. Tenere lontano dalla portata dei bambini
2. Persone con allergie, diabete, sintomi di congelamento, cicatrici, ferite aperte o problemi circolatori devono consultare un medico prima di utilizzare le coperte READY-HEAT.
3. Rimuovere immediatamente la coperta se è troppo calda o se non ci si sente bene. La massima temperatura raggiungibile dalla coperta è di 52° C (125° F). Non utilizzare durante il sonno. Non posizionare la coperta direttamente sulla nuda pelle.
4. Non aprire le tasche sigillate e non permettere il contatto del contenuto con bocca e occhi. Qualora dovesse accadere, lavare abbondantemente con acqua corrente. Il contenuto è composto da polvere di ferro che, se ingerita, può essere dannosa per l'organismo. Qualora ingerita, contattare immediatamente il centro antiveleni più vicino.

Specifiche tecniche:

La coperta monopaziente READY-HEAT II ha una dimensione, una volta aperta, di cm. 86 x 122 circa (34"x48") e pesa 680 gr. circa.

La confezione minima di vendita, (cartone), contiene 8 coperte READY-HEAT II.

La coperta monopaziente READY-HEAT MINI ha una dimensione, una volta aperta, di cm. 40 x 45 circa (16"x18") e pesa 200 gr. circa.

La confezione minima di vendita, (cartone), contiene 24 coperte READY-HEAT MINI.

Scadenza:

Entrambe le coperte hanno un vita utile, (Shelf Life), di 5 anni dalla data di produzione.

Codice Distributore	Codice Produttore	Descrizione	Numero Repertorio	Confez.
EMI 200-500	G2RH12	READY-HEAT II	103878/R	8 pz.
EMI 200-501	S1RHSM	READY-HEAT MINI	108184/R	24 pz.