


Sticky Whiskers™

**Per il fissaggio sicuro e delicato delle
cannule nasali da ossigenoterapia**

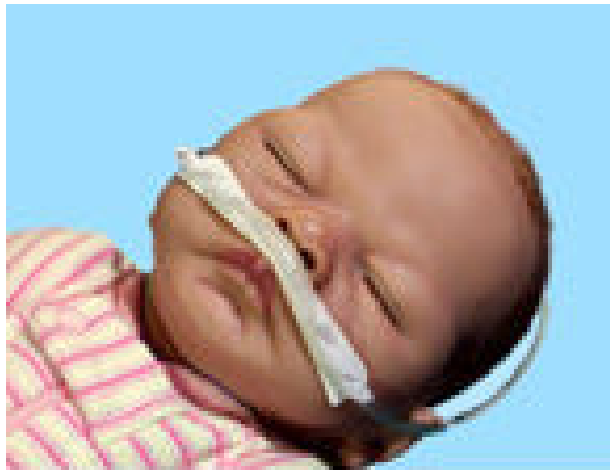

Sticky Whiskers:

- ***mantiene il corretto posizionamento delle cannule nasali tramite il sottile strato in Velcro.***
- ***resta attaccato al viso del paziente tramite l'idrocolloide adesivo, che non causa irritazioni .***
- ***permette un semplice riposizionamento delle cannule.***
- ***è in taglia unica per tutti i pazienti.***
- ***può essere utilizzato anche per il fissaggio del sondino nasogastrico.***



Beevers Manufacturing

Il fissaggio di cannule o altri tubi ai piccoli pazienti è da sempre problematico, spesso si utilizzano cerotti che risultano troppo aggressivi per la delicata cute dei neonati, causando irritazioni e non risultando comunque pratici nel momento in cui si devono spostare o riposizionare i dispositivi con essi assicurati, o al contrario con il rischio se la parte adesiva è troppo debole di uno spostamento accidentale.

Sticky Whiskers garantisce un fissaggio ed un grado di adesività ottimale, oltre ad un semplice riposizionamento delle cannule.

APPLICAZIONE

1. Pulire, con acqua, la cute del paziente ed asciugarlo



2. Fissare in modo uniforme il lato adesivo dello Sticky Whiskers sopra al labbro del paziente



3. Attaccare le strisce di velcro adesive **ai lati** dei "denti" delle cannule nasali



4. Fissare le cannule, tramite le strisce in Velcro allo Sticky Whiskers.



5. Per rimuovere le cannule, senza asportare Sticky Whiskers, tenerlo in posizione con un dito, mentre si staccano con delicatezza



6. Riposizionare, infine, le cannule.



Sticky Whiskers™
*Keep the "O"s
in the Nose!*

Caratteristiche del prodotto:

- **misura unica adatto a tutti i pazienti**
- **Marcato CE**
- **Durata massima prevista 72h**
- **Elevata trasparenza**
- **Latex free**
- **Monouso**

Codice	Descrizione	Confezione
EMI 400-010	Sticky Whiskers	25 pz.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

EMIMED TECH S.r.l.

Via Gramsci 104/F - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/515306 - Fax 0522/0131162
Website: www.emimed.it - Email: info@emimed.it

PATENT PENDING

EmiMed^{srl}
Tech

Distribuito da: