

SCHEDA TECNICA

STICKY WHISKERS™

Prodotto da:	Beevers Mfg & Supply, Inc. 14670 Baker Creek Rd. McMinnville, OR 97128 – U.S.A.
Mandatario Europeo:	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH – The Hague - Olanda
Importatore autorizzato: per l'Italia	Emimed Tech S.r.l. Via Gramsci 104/F - 42124 Reggio Emilia
Classe di appartenenza in conformità alla Direttiva Europea 93/42/EEC	Classe I
Dispositivo medico sterile:	NO
Presenza lattice:	NO
Classificazione CND:	V0299 – Dispositivi per neonatologia e pediatria - altri

Descrizione:

Sticky Whiskers™ è un dispositivo medico monouso appositamente progettato e sviluppato per il fissaggio di cannule nasali ai pazienti neonatali.

Sticky Whiskers™ permette il corretto posizionamento delle cannule nasali attraverso un sottile strato di velcro che rimane in sito tramite l'idrocolloide adesivo. Attorno alle cannule nasali si avvolgono le due strisce adesive presenti nella confezione che si fissano infine al velcro.

Sticky Whiskers™ è composta da velcro e da uno specifico idrocolloide adesivo (3M 9943), risultando pertanto privo di lattice.

Sticky Whiskers™ facilita inoltre l'operazione di riposizionamento della cannula nasale e permette anche il fissaggio del sondino naso-gastrico.

Tollerabilità:

Il prodotto non riscontra incompatibilità verso le sostanze con le quali è previsto venga a contatto durante il normale utilizzo. Sticky Whiskers™ può rimanere in sito fino a quando mantiene l'adesività, mediamente 72 ore. La base idrocolloide è un fissaggio delicato ma resistente e non causa irritazione alla pelle quando in posizione o durante la rimozione.

Stoccaggio e conservazione:

Conservare a temperatura ambiente e mantenere le confezioni in luoghi asciutti. La conservazione in luoghi esposti a temperature superiori a 60° C (150° F) può alterare la funzionalità del prodotto senza tuttavia, generare situazioni di rischio.

Confezionamento:

Sticky Whiskers™ è imbustato singolarmente in blister ad apertura facilitata. All'interno del blister è presente un primo supporto con la striscia composta da idrocolloide nella parte inferiore e da velcro nella parte superiore, che deve essere posizionata sotto il naso del paziente e da un secondo supporto con le due strisce adesive da avvolgere intorno alla cannula e quindi posizionare sul velcro. Ogni confezione contiene 25 blister. Sticky Whiskers™ è un prodotto in taglia unica per tutti i pazienti.

Codice Distributore	Codice Produttore	Descrizione	Numero di Repertorio	Confezione
EMI 400-010	SW102	Sticky Whiskers	85838/R	25 pz.