

SCHEDA TECNICA

TRAUMA TRANSFER COVER

Produttore:	ESON COMFORT Centrumvägen, 7 – Box 105 SE 314-04 Landeryd - Svezia
Importatore autorizzato: per l'Italia	Emimed Tech S.r.l. Via Gramsci 104/F - 42124 Reggio Emilia
Classe di appartenenza in conformità alla Direttiva Europea 93/42/EEC	Classe I
Metodo di sterilizzazione:	NON STERILE
Presenza lattice:	NO
Classificazione CND:	T04010299 – Traverse assorbenti - altre

Descrizione:

TRAUMA TRANSFER COVER è una coperta monopaziente con sistema di immobilizzazione del capo integrato, da utilizzarsi esclusivamente in combinazione con la barella intra-ospedaliera TRAUMA TRANSFER.

TT COVER è stata progettata per ottenere una sicura e duratura immobilizzazione del paziente una volta posizionato sul materasso imbottito TRAUMA TRANSFER. I materiali che compongono la coperta consentono inoltre di ridurre la perdita di calore dal corpo del paziente, di impedire la contaminazione del materasso imbottito TRAUMA TRANSFER e della barella ed infine garantiscono una elevata resistenza alle forze di trazione necessarie alla movimentazione del paziente.

Il sistema di immobilizzazione del capo, integrato nella coperta monopaziente, è altresì dotato di strip a velcro per il fissaggio nella zona della fronte e, tramite il collare, del collo.

Materiali:

La coperta monopaziente TT COVER è fabbricata in polyester-viscose e polipropilene.

I supporti laterali per il capo sono fabbricati in politene.

La coperta monopaziente TT COVER, al termine del suo utilizzo, può essere distrutta per termovalorizzazione.

Utilizzo:

- Posizionare la coperta monopaziente TT COVER sul materasso TRAUMA TRANSFER.
- Infilare la parte superiore del TRAUMA TRANSFER all'interno della tasca del TT COVER, e fissare le fascette a velcro.
- Fissare le fascette a velcro poste lungo il TT COVER attraverso le maniglie del TRAUMA TRANSFER.
- Svolgere completamente il TT COVER in lunghezza e larghezza.
- Prima di trasferire il paziente estrarre i profili neri per il fissaggio del capo dal loro alloggiamento
- Con il paziente in posizione, riposizionare i profili neri all'interno del loro alloggiamento
- Avvolgere il TT COVER sul paziente ed immobilizzarne la testa mediante le due fasce a velcro in dotazione.

Fissaggio della testa:

Qualora non si ritenesse necessario utilizzare una copertura di tutto il materasso TRAUMA TRANSFER , è possibile acquistare il sistema di fissaggio della testa TT HEAD FIX, che corrisponde alla sola parte superiore della coperta TT COVER. I materiali utilizzati nella produzione del sistema TT HEAD FIX sono i medesimi della coperta TT COVER ed identico ne è il posizionamento sul materasso.

Codice Distributore	Codice Produttore	Descrizione	Numero di Repertorio	Confezione
EMI 200-101	TTCOVER	TT COVER	110737/R	25 pz.
EMI 200-102	TTCOVERM	TT COVER MINI (pediatrico)	110738/R	25 pz.
EMI 200-103	TTHEADFIX	TT HEAD FIX	---	50 pz.

Avvertenze:

Il codice EMI 200-101 TT COVER deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione al materasso TRAUMA TRANSFER codice EMI 200-100.

Il codice EMI 200-102 TT COVER MINI deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione al materasso TRAUMA TRANSFER MINI (pediatrico) codice EMI 200-110.