

Per la completa, veloce e sicura stabilizzazione della frattura di bacino



TPOD fornisce una potente, veloce e sicura compressione del bacino. Queste foto dimostrano (a destra) l'efficacia del TPOD nella chiusura e stabilizzazione della regione pelvica



Pre-application of TPOD



Post-application of TPOD



TPOD si applica con manovre semplici, veloci e sicure.

1 - Posizionare la cintura

Fare scorrere la cintura T-POD sotto al paziente (Fig. 1)

2 - Adattare la cintura alla taglia del paziente

Tagliare la cintura lasciando uno spazio di 15/20 centimetri al centro dell'addome. (Fig. 2)

3 - Applicare il sistema di trazione

Posizionare saldamente il sistema di trazione a velcro ai due estremi della cintura.

4 - Effettuare la compressione

Tirare la linguetta del sistema di trazione per ottenere la compressione simultanea della regione pelvica. (Fig. 3)

5 - Fissare il sistema

Ancorare la linguetta agli appositi ganci, in modo da garantire il mantenimento della compressione

6 - Registrazione

Ora e data di applicazione possono essere registrate nell'apposito spazio.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Unico...

Il sistema di carrucole brevettato amplifica fino a 6 volte la forza applicata permettendo, senza sforzo, di ottenere una chiusura del bacino ottimale; il sistema di fissaggio (tramite gli appositi ganci) garantisce poi la stabilità necessaria per tutto il tempo occorrente.

Monouso...

TPOD è un presidio completamente monouso. Ciò garantisce un'adeguato controllo delle infezioni e prestazioni ottimali.

Risultati evidenti e documentati.

Un'importante studio** pubblicato nel 2007 ha analizzato 186 pazienti; su 93 di questi è stato utilizzato il TPOD. I risultati dimostrano evidenti risparmi in termini di *unità di sangue trasfuse* (4.9 vs 17.1 a 24h) ed in termine di riduzione dei tempi di degenza (16.5 gg vs. 24.4)

**Emergent Pelvic Fixation in Patients with Exsanguinating Pelvic Fractures

Martin A. Croce MD, FACS, Louis J. Magnotti MD, FACS, Stephanie A. Savage MD, George W. Wood II MD, FACS and Timothy C. Fabian MS FACS
Department of Surgery, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN.

Caratteristiche del prodotto:

- **Misura unica. Si adatta ad ogni paziente**
- **Radiotrasparente**
- **Uso estremamente semplice ed intuitivo**
- **Monouso**
- **Sicuro anche per uso pediatrico**
- **L'unico prodotto considerato efficace come una fissazione definitiva**
- **Latex free**

Per ordinare TPOD: Codice EMI 200-001 - TPOD ORANGE

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

EMIMED TECH S.r.l.

Via Gramsci 104/F - 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522/515306 - Fax 0522/0131162

Website: www.emimed.it - Email: info@emimed.it