



Cybertech Medical™

Mechanical Advantage
TPOD™
Trauma Pelvic Orthotic Device

Domande frequenti

1. Quanta forza devo applicare all'unità di trazione?

L'ideale tensione è assicurata dai 15/20 cm. lasciati nella parte frontale che garantiscono inoltre una compressione circonferenziale simultanea. Avvertirete una resistenza man mano che TPOD distribuirà la compressione circonferenziale e potrete adattarlo in sicurezza senza rischi di stringere eccessivamente.

2. Devo posizionare questo device in tutti i pazienti con sospetta frattura di bacino?

Sì, potrete usare TPOD su tutti i pazienti con sospetta frattura di bacino.

3. Vi sono controindicazioni all'uso di questo device?

Non sono state riscontrate controindicazioni all'uso di TPOD; non usarlo potrebbe mettere a repentaglio l'outcome e la salute del paziente.

4. Posso mettere il device sopra i pantaloni?

Sì, ma è sicuramente meglio rimuovere i pantaloni per un'adeguata valutazione del paziente.

5. TPOD è un device monouso?

Sì, TPOD non deve essere riutilizzato per due ragioni: 1) viene tagliato a misura per ogni paziente 2) devono essere prese le adeguate precauzioni contro sangue e fluidi corporei

6. Per quanto tempo può essere mantenuto in uso TPOD?

Idealmente non più di 48 h. Se necessario, TPOD può essere utilizzato per tempi superiori, ma sarà necessario controllare frequentemente l'integrità della cute.

7. Come faccio ad accedere alla zona inguinale per l'angiografia?

Potrete asportare (tagliandola) una tacca sufficiente a garantire l'accesso, senza per ciò compromettere la funzionalità del device.

8. Chiunque può posizionare il dispositivo?

Sì, esso è infatti sicuro da posizionare per qualsiasi operatore del settore, ed anche un solo training di apprendimento è sufficiente.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

EMIMED TECH S.r.l.

Via Gramsci 104/F 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/515306 Fax 0522/0131162
www.emimed.it email: info@emimed.it
Part. IVA/Cod. Fisc. 020482000352

EmiMed^{srl}