


Ready-Heat™ System

Coperte autoriscaldanti monouso per il trattamento delle situazioni di shock ed ipotermia

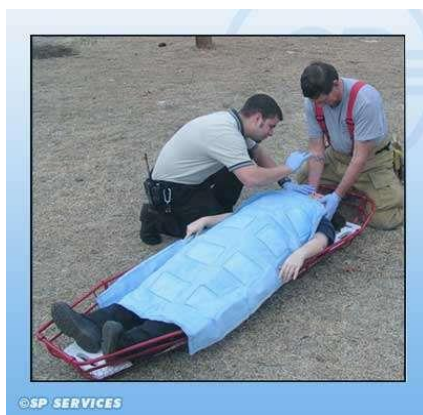

Ready-Heat™ II

Coperta autoriscaldante monopaziente.
Almeno 8 ore di riscaldamento a più di 40°
Attiva in pochi minuti, leggera e facilmente trasportabile.

Ready-Heat™ Mini

Utilizzabile per un riscaldamento localizzato, ad esempio per le estremità o per le sacche di liquidi da infusione grazie alle fasce elastiche con attacco a velcro



Ready-Heat™ Infant Warming Cocoon

Coperta specifica, per uso pediatrico, permette una corretta regolazione della taglia grazie agli attacchi in velcro. Dotata di cappuccio per un'adeguata protezione della testa.



Ready-Heat™ Infant Warming Kit

Kit composto da Infant Warming Cocoon + RH Mini
Garantisce un riscaldamento più costante in tutti quei casi in cui sia necessario un accesso al paziente



Ready-Heat™ Vest

Indumento per la protezione dell'operatore in situazioni di emergenza. Leggero, compatto ed in taglia unica può essere facilmente trasportato in ogni borsa o zaino.



VISTA ANTERIORE VISTA POSTERIORE



Ready-Heat™ System


Le coperte Ready-Heat, realizzate in tessuto non tessuto, contengono elementi riscaldanti che **reagendo con l'ossigeno** presente nell'aria sviluppano calore.

Raggiungono una temperatura operativa di circa 40°C nell'arco di pochi minuti garantendo un riscaldamento attivo per almeno 8 ore.

Estremamente maneggevoli per l'operatore vista la leggerezza ed il minimo ingombro quando imbustate.

Grafico della temperatura di riscaldamento di ReadyHeatII

Temperatura rilevata in corrispondenza di un elemento riscaldante.
Prova effettuata ad una temperatura ambiente di 21 °C

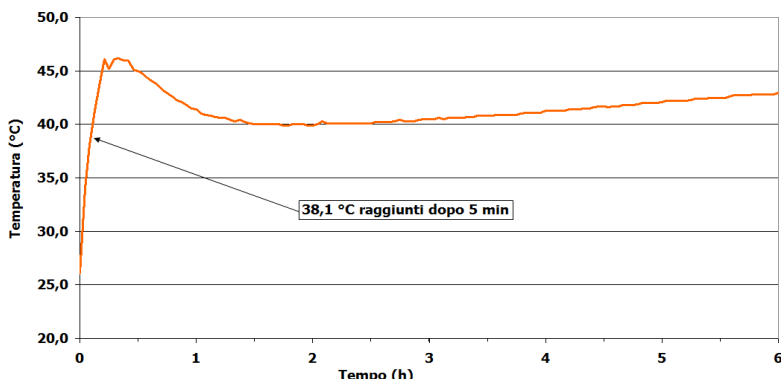

Si utilizzano in totale assenza di alimentazione esterna, sia a corrente che a batteria, permettendone l'impiego nelle più svariate situazioni di soccorso. Completamente monouso e composte da materiali naturali, non danneggiano l'ambiente e sono smaltibili come normale rifiuto ospedaliero.

Caratteristiche delle coperte Ready-Heat™



RH Mini



RH II

- Autoriscaldanti
- Buste ad apertura facilitata
- Uso semplice ed intuitivo
- Materiale idrorepellente
- Latex free
- Elevata durata (>8h)
- Imbustato singolarmente
- 5 anni di validità



Infant Cocoon



RH Vest

Codice	Descrizione	Misure	Peso	Confezione
EMI 200-500	Ready Heat II Coperta	Cm. 86x122	Gr. 680	8 pezzi
EMI 200-501	Ready Heat Mini	Cm. 40x45	Gr. 220	12 pezzi
EMI 200-502	Ready Heat II Infant Cocoon	Cm. 66x66	Gr. 270	12 pezzi
EMI 200-510	Ready Heat VEST	Taglia unica	Gr. 280	12 pezzi

Importatore esclusivo per l'Italia:

EMIMED S.r.l.

Via L. Pasteur, 16/A – 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522/515306 – Fax 0522/0131162

Website: www.emimed.it

Email: info@emimed.it

Distribuito da: